


Catalyst* SmartQC* Kontrolle

Kurzanleitung

Lagerung und Handhabung

- + **Es ist kein Aufwärmen und Vorbereiten der Flüssigkeit erforderlich – Test kann sofort nach der Entnahme aus dem Kühlschrank durchgeführt werden.**
- + Im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren.
- + Kann in ungeöffneter Folienverpackung bis zu 5 Mal bei Raumtemperatur bis zu 8 Stunden gelagert werden. Jegliches unverbrauchtes oder ungeöffnetes Material nach Ablauf von 8 Stunden im Kühlschrank lagern.
- + Falls versehentlich eingefroren:
 - + < 8 Stunden: Vor der Verwendung mindestens 60 Minuten bei Raumtemperatur auftauen.
 - + > 8 Stunden: Entsorgen.

Catalyst SmartQC leicht gemacht – laden und loslegen

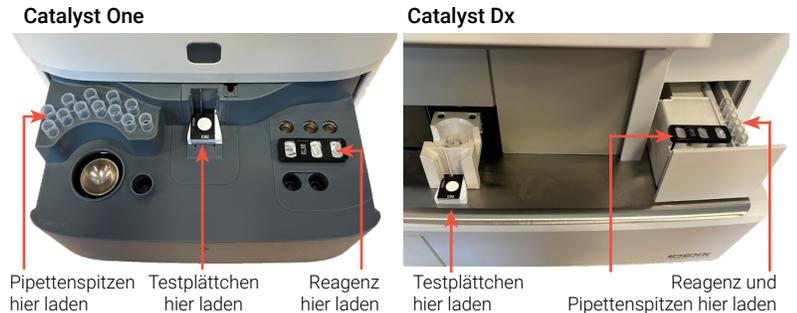

Häufig gestellte Fragen

Frage	Antwort
Was ist die Catalyst SmartQC Control?	Die Catalyst SmartQC Control ist ein Qualitätskontrollmaterial (ein Catalyst CLIP und eine Reagenzienpackung), mit dem Sie überprüfen können, ob Ihr Catalyst One* Blutchemie- und Elektrolyt-Analysegerät oder Catalyst Dx* Blutchemie- und Elektrolyt-Analysegerät ordnungsgemäß funktioniert.
Wann sollte ich die Catalyst SmartQC verwenden?	Die Catalyst SmartQC sollte monatlich nach der Reinigung der internen Komponenten des Analysegerätes, bei der Installation oder immer dann ausgeführt werden, wenn das Analysegerät versetzt wurde.
Wie führe ich die Catalyst SmartQC durch?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reinigen Sie die internen Komponenten Ihres Catalyst Analysegerätes. 2. Für Catalyst One: Tippen Sie auf das Symbol Catalyst One auf der Startseite der IDEXX VetLab* Station und dann auf Wartung > SmartQC > SmartQC durchführen. ODER Für Catalyst Dx: Tippen Sie auf das Symbol Catalyst Dx auf der Startseite der IDEXX VetLab Station und dann auf SmartQC > SmartQC ausführen. 3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm der IDEXX VetLab Station (Catalyst One) oder des Catalyst Dx Touchscreens (Catalyst Dx), um die SmartQC-Materialien in Ihr Analysegerät zu laden und den Lauf auszuführen.
Kann ich die Catalyst SmartQC mit einer Patientenprobe oder mit anderen Catalyst CLIPs/Testplättchen ausführen?	Nein, laden Sie nur die Pipettenspitzen, den Catalyst SmartQC CLIP und das Reagenz für den QC-Lauf – laden Sie keinen Probenbecher, Vollblutseparator oder andere CLIPs/Testplättchen (einschließlich des Catalyst* Lyte 4 CLIP, wie es in der Vergangenheit für die monatliche QC erforderlich war).
Wie lange ist die Laufzeit für die Catalyst SmartQC?	Die Ergebnisse von Catalyst SmartQC sind weniger als 15 Minuten nach dem Start des Laufs verfügbar.
Liefert Catalyst SmartQC Ergebnisse?	<p>Ja, Ihr Catalyst SmartQC-Lauf wird Ihnen die Ergebnisse „Pass“ (bestanden) oder „out of range“ (außerhalb des Referenzbereichs) liefern:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Die Ergebnisse „pass“ (bestanden) bestätigen, dass Ihr Analysegerät optimal funktioniert, und Sie können mit der Verwendung des Analysegeräts wie gewohnt fortfahren. + Ergebnisse „out of range“ (außerhalb des Referenzbereichs) weisen darauf hin, dass während des Laufs ein Problem festgestellt wurde. Wenn Sie ein Ergebnis „out of range“ (außerhalb des Bereichs) erhalten, wiederholen Sie den Test mit neuen Catalyst SmartQC-Testplättchen und Reagenzien. Wenn auch der zweite Durchlauf „out of range“ (außerhalb des Bereichs) ist, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von IDEXX, um Hilfe zu erhalten.
Wie kann ich mir eine Erinnerung schicken, wann Catalyst SmartQC auf meinem Analysegerät ausgeführt werden muss?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Für Catalyst One: Tippen Sie auf das Symbol Catalyst One auf der Startseite der IDEXX VetLab* Station und dann auf Wartung > SmartQC. ODER Für Catalyst Dx: Tippen Sie auf das Symbol Catalyst Dx auf der Startseite der IDEXX VetLab Station und dann auf Qualitätskontrolle. 2. Wählen Sie auf der linken Seite des Bildschirms in den entsprechenden Dropdown-Listen aus, wann Sie eine wiederkehrende Erinnerungsnachricht erhalten möchten.