



Fast wie ein Teil des Praxisteam

SNAP Pro* Analysegerät



IDEXX

Machen Sie weniger. Mit dem SNAP Pro bekommen Sie mehr.

Mit dem SNAP Pro* Analysegerät müssen Sie nur noch die Probe vorbereiten, in den SNAP-Test geben und den Test in den SNAP Pro stellen. Drei einfache Schritte sparen Ihnen Zeit, damit Sie sich voll auf Ihre Patienten konzentrieren können.

Einfacher geht's nicht.



Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3



Die SNAP*-Tests von IDEXX bieten Ihnen die Qualität eines externen Labors und sind dabei präzise und einfach in der Handhabung. So können Sie fundierte Entscheidungen für Ihre Patienten treffen.

Lassen Sie den SNAP Pro die Arbeit für Sie erledigen:



Aktiviert den SNAP-Test



Liest den Test zum richtigen Zeitpunkt ab



Interpretiert die Ergebnisse



Überträgt die Befunde in die Patientenakte



Erfasst die Kosten für eine vollständige Abrechnung



Ein wenig mehr über das SNAP Pro Analysegerät:

- + Sehen Sie die Befunde auf einen Blick für eine schnelle und genaue Einschätzung der Gesundheit.
- + Kein Timer mehr - das Gerät liest den Test zum korrekten Zeitpunkt ab. So müssen Sie nicht daneben stehen und warten.
- + Farbige und einfach zu lesende Ergebnisse ermöglichen eine eindeutige Interpretation, damit Sie und Ihr Team noch souveräner und effizienter sind.



“Zu jeder beliebigen Zeit an jedem beliebigen Tag habe ich mindestens zehn Dinge gleichzeitig zu tun. Eine Aufgabe weniger... ist wie ein Geschenk.”

Fran Kaminski, TFA
Central Veterinary Hospital

Und es gibt viele weitere Vorteile.

Was kann das SNAP Pro* Analysegerät noch? Mehr. Viel mehr.

- + Über die IDEXX VetLab* Station werden die Befunde der SNAP*-Tests automatisch in die Patientenakte übertragen und dort gespeichert.
- + Vergleichen Sie neue mit bisherigen Befunden in VetConnect* PLUS um ein aktuelles Bild vom Gesundheitsstatus Ihrer Patienten zu erhalten.
- + Weniger verpasste Abrechnungen und automatisches Hinzufügen der Befunde zur Patientenakte über eine integrierte Praxissoftware.




Laut einer Studie werden 18 % der Abrechnungen von Schnelltests vergessen. Jeder hat viel zu tun. Es kann passieren.

Verbinden Sie Ihr SNAP Pro* Analysegerät mit VetConnect* PLUS für noch mehr Möglichkeiten.

VetConnect PLUS bietet Ihnen einen schnellen und einfachen Zugang zu all Ihren labordiagnostischen Befunden. So können Sie den Gesundheitszustand Ihrer Patienten rasch, umfassend und souverän einschätzen.

- + Sehen sie sofort Auffälligkeiten in kürzester Zeit durch einfach zu interpretierende graphische Darstellungen und Gegenüberstellungen von neuen und bisherigen Befunden.
- + Bleiben Sie bei jedem Fall immer auf dem Laufenden mit der personalisierbaren VetConnect PLUS App für iPhone* oder Android*. Erhalten Sie Benachrichtigungen sobald die Befunde Ihrer Patienten verfügbar sind - jederzeit und überall.
- + Gestalten Sie die Gespräche mit Tierhalter/innen effektiver, indem Sie personalisierbare Zusammenfassungen der Befunde teilen.
- + Teilen Sie einfach die Befunde eines Patienten mit anderen Praxen oder Spezialisten.
- + Beschleunigen Sie Testanforderungen, reduzieren Sie versäumte Abrechnungen und verhindern Sie doppelte Dateneingaben praktisch vollständig, indem Sie sich mit Ihrer Praxissoftware verbinden.

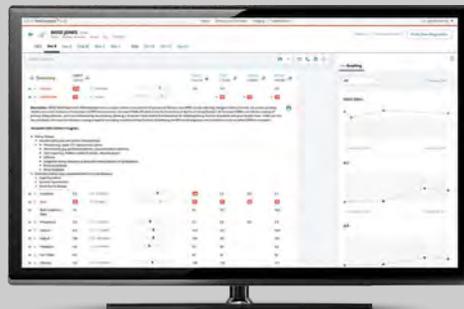



Weitere Fragen? Wir haben die Antworten.

Kann ich den SNAP Pro bei Terminen außerhalb meiner Praxis nutzen?

Ja. Das SNAP Pro Analysegerät gibt Ihnen volle Flexibilität. Es kann überall innerhalb oder außerhalb der Praxis genutzt werden. So können Sie Tierhaltern einfach die Ergebnisse zeigen.

Wie viele Daten kann er speichern?

Die letzten 100 Ergebnisse werden zusammen mit den Bildern im Gerät selbst gespeichert. Wenn er mit VetConnect PLUS verbunden ist, können unbegrenzt viele Befunde gespeichert werden.

Welche SNAP-Tests können vom Gerät ausgelesen werden?

Folgende Tests: SNAP* 4Dx* Plus, SNAP* Leish 4Dx, SNAP* Herzwurm, SNAP* Feline Triple*, SNAP* FIV/FelV Kombi Plus, SNAP* FeLV, SNAP* *Leishmania*, SNAP* *Giardia*, SNAP* Parvo, SNAP* Lepto, SNAP* Feline proBNP, SNAP* cPL*, und SNAP* fPL* .

Benötige ich eine IDEXX VetLab* Station, um den SNAP Pro nutzen zu können?

Nein. Der SNAP Pro kann als einzelnes Analysegerät genutzt werden. Eine Verbindung mit der IDEXX VetLab Station bietet aber den Vorteil, dass die Ergebnisse automatisch in die Patientenakte übertragen werden und Sie sich diese im Zusammenhang mit der Historie des Patienten anschauen können.



Es ist an der Zeit, Zeit zu sparen – mit dem SNAP Pro.

Um mehr über den Einsatz des SNAP Pro* Analysegeräts zu erfahren, besuchen Sie unsere Webseite oder wenden Sie sich an Ihren zuständigen IDEXX Außendienst.

IDEXX GmbH
Humboldtstr. 2
70806 Kornwestheim
idexx.de

IDEXX Diavet AG
Schlyffstr. 10
8806 Bäch
idexx.ch

IDEXX Vet Med Labor GmbH
Börsegasse 12/1
1010 Wien
idexx.at

Literatur

1. Daten hinterlegt bei IDEXX Laboratories, Inc. Westbrook, Maine USA.

© 2023 IDEXX Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten. •09-2690517-00 • Die Datenschutzrichtlinie von IDEXX finden Sie unter [idexx.com](https://www.idexx.com).

*4Dx, cPL, Feline Triple, fPL, IDEXX VetLab, SNAP, SNAP Pro und VetConnect sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von IDEXX Laboratories, Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle anderen Namen von Produkten oder Firmen sowie Logos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.